



Azienda Ospedaliera
FATEBENEFRAPELLI E
OFTALMICO

DOCUMENTO OPERATIVO/INFORMATIVO
UTILIZZO DEI LETTINI DA VISITA ARTICOLATI
MANUALI

DOISPP 03
DATA: 08/08/2011
Rev. 0
Pagina 1 di 2

1. SCOPO DEL DOI

L'uso dei dispositivi medici è soggetto alle disposizioni contenute nel capo I; Titolo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quando tali dispositivi sono attrezzature di lavoro. I lettini da visita articolati manuali presenti nella nostra Azienda Ospedaliera sono a tutti gli effetti "Attrezzature di lavoro". Lo scopo di questo documento è d'informare il personale, che a vario titolo utilizza i lettini da visita, sui rischi residui legati all'utilizzo di questa tipologia di attrezzatura di lavoro rispetto a possibili eventi accidentali.

2. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 - Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i..
- DVR 01 Documento di Valutazione dei Rischi Generale Introduttivo Art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

3. RESPONSABILITÀ

- Servizio di Prevenzione e Protezione: è affidata la stesura e la diffusione del presente documento a tutti i Dirigenti e Preposti.
- Dirigenti e Preposti: è affidata la diffusione capillare del presente documento a tutto il personale utilizzatore dei lettini da visita.
- Dirigenti e Preposti: sono affidate le verifiche previste alla sezione 5 del presente documento.
- Lavoratori: devono utilizzare i lettini nel rispetto di quanto contenuto nel presente documento.

4. TIPOLOGIA DI LETTINI

Lettini da visita articolati manuali.

5. USO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE

Il lettino deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

5.1 VERIFICHE INIZIALI

Alla consegna del lettino occorre verificare:

- che quanto consegnato sia conforme a quanto ordinato;
- la presenza della marcatura CE;
- che l'installazione sia avvenuta secondo le indicazioni del costruttore;
- la funzionalità del lettino.

Motivo revisione	Prima emissione	Distribuzione	Controllata
Redazione	RSPP: Sig.ra S. Cavenago	<i>S. Cavenago</i>	
Verifica	RTQ SPP: Sig.ra S. Forti RQ SPP: Sig.ra S. Cavenago	<i>S. Forti</i> <i>S. Cavenago</i>	
Approvazione	RSPP: Sig.ra S. Cavenago	<i>S. Cavenago</i>	



Azienda Ospedaliera
FATEBENEFRAATELLI E
OFTALMICO

DOCUMENTO OPERATIVO/INFORMATIVO
UTILIZZO DEI LETTINI DA VISITA ARTICOLATI
MANUALI

DOISPP 03
DATA: 08/08/2011
Rev. 0
Pagina 2 di 2

5.2 VERIFICHE PERIODICHE

Prima dell'utilizzo del lettino occorre verificare:

- l'assenza di danni e/o contaminazioni;
- l'integrità dei meccanismi di bloccaggio dello schienale, delle parti articolate e la loro funzionalità;
- la presenza degli accessori – telino – porta telino integro.

Se dalle verifiche dovessero emergere delle criticità tali da rendere pericoloso il suo utilizzo è necessario disporre il DIVIETO d'uso sino al ripristino delle condizioni ottimali. Se il lettino non dovesse essere riparabile è necessario disporre il DIVIETO d'uso e richiederne la sostituzione.

6. RISCHI RESIDUI

Al fine di evitare rischi residui per i lavoratori (e per i pazienti) ogni qualvolta si utilizzi il lettino è necessario:

- tenere saldamente il lettino durante la salita e la discesa del paziente onde evitare il rischio di ribaltamento;
- non far salire o scendere il paziente dal lato dello schienale;
- porre molta attenzione durante la manovra di piegatura e distensione dello schienale onde evitare il rischio di schiacciamento degli arti superiori.