

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	--

Emissione: 19.3.1997	<b>PROCEDURA N. 25</b>
Aggiornamento: 27.9.2001	<b>NORME OPERATIVE PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE PER RADARTEAPIA</b>
Destinatari	Personale sanitario e tecnico addetto.

#### ◀ **NORME GENERALI**

Le apparecchiature possono essere utilizzate solo da personale qualificato e autorizzato.

Le apparecchiature devono mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. Segnalatore di funzionamento presente.
2. Disponibilità di manuali con la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature.

#### ◀ **CARATTERISTICHE DELL'AREA DI IMPIEGO**

- Il cartello affisso sulla porta di accesso all'area di trattamento, indicante pericolo di radiazioni non ionizzanti e accesso consentito solo al personale autorizzato durante il funzionamento, deve rimanere ben visibile nel tempo.
- Durante il trattamento l'accesso e la sosta sono permessi solo al personale strettamente indispensabile.
- Qualora non necessario per la sorveglianza del paziente, il personale non deve sostare nella zona di trattamento.
- Verificare che la luce di segnalazione di apparecchiatura in funzione sia regolarmente accesa durante il trattamento.
- Mantenere periodicamente l'apparecchiatura.

#### ◀ **PROTEZIONE DEI PAZIENTI:**

- Al termine del periodo prefissato di trattamento, l'emissione del campo magnetico si deve interrompere automaticamente, pertanto verificare periodicamente il suo corretto funzionamento.