

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	---

Emissione: 2.4.1999  Aggiornamento: 27.9.2001	<b>PROCEDURA N. 38</b>
	<b>AVVERTENZE PER LA SICUREZZA NELL'USO DI APPARECCHIATURE STERILIZZATRICI A VAPORE</b>
<b>Destinatari</b>	Personale operante presso la Centrale di Sterilizzazione e nei reparti vari dove sono installate autoclavi funzionanti a vapore a vapore.

#### ◀ **NORME GENERALI**

1. Gli operatori che utilizzano la sterilizzatrice debbono essere qualificati per questo tipo di attività.
2. La manutenzione e riparazione della sterilizzatrice deve essere eseguita da personale tecnico qualificato.
3. La calibrazione deve essere eseguita da tecnici specializzati con l'ausilio di strumentazione adeguata. Un utilizzo improprio di questa funzione può essere pericoloso.
4. L'area di caricamento della sterilizzatrice deve essere mantenuta pulita al fine di evitare condizioni pericolose dovute al pavimento sdruciolevole.
5. I cestelli, i containers, i vassoi, le confezioni in genere e i carrelli interni devono essere manipolati indossando speciali guanti anticalore per evitare scottature alla fine del ciclo di sterilizzazione.
6. Si devono indossare guanti protettivi, ogni qualvolta si è a contatto con la camera di sterilizzazione calda.
7. Si deve fare attenzione a tutte le parti interne non protette della sterilizzatrice poiché possono provocare scottature, a sterilizzatrice calda.
8. Si devono indossare guanti protettivi per la verifica del funzionamento della valvola di sicurezza.
9. Non si devono per nessun motivo modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza della sterilizzatrice.
10. Si deve mantenere pulita la pannellatura frontale della sterilizzatrice usando un panno morbido e soluzioni non aggressive per l'acciaio inossidabile.
11. Si deve mantenere pulita la camera della sterilizzatrice usando un panno morbido e soluzioni non aggressive per l'acciaio inossidabile.
12. Controllare che la guarnizione della porta sia bene inserita nella sede prima di chiudere la porta stessa
13. Non si devono usare utensili acuminati per inserire o togliere la guarnizione di tenuta della camera dalla sede.

In caso di autoclave con ciclo per liquidi attivato, seguire le seguenti istruzioni per evitare rischi di esplosione di bottiglie contenenti liquidi caldi.

14. Non sterilizzare liquidi contenuti in contenitori chiusi ermeticamente.
15. Inserire la sonda prodotto flessibile, posta in camera, nel contenitore del liquido da sterilizzare.
16. Per sterilizzare liquidi contenuti in contenitori aperti utilizzare solo il ciclo specifico.
17. Utilizzare contenitori idonei per i liquidi e la temperatura.
18. Attendere la fine del ciclo prima di aprire la porta. La sterilizzatrice automaticamente consentirà l'apertura solo al raggiungimento della temperatura di 80°C nel prodotto.
19. Manipolare con cautela indossando i guanti protettivi anticalore.