

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	--

Emissione: 14.1.2000	PROCEDURA N. 60
Aggiornamento: 27.9.2001	NORME DI RADIOPROTEZIONE NELL'IMPIEGO DELLE SORGENTI SIGILLATE DI GADOLINIO-153 INSTALLATE SULLA GAMMA CAMERA VERTEX
Destinatari	Personale operante in Medicina nucleare.

◀ NORME DI PROTEZIONE

E' obbligatorio:

- Proteggersi dietro le schermature, poste a protezione del tavolo di comando, durante l'esecuzione dell'esame.
- Controllare che al termine dell'esame i segnali luminosi, indicanti lo stato di apertura dell'otturatore delle sorgenti sigillate, siano spenti. Ciò sta ad indicare la corretta chiusura degli otturatori.
- In caso di malfunzionamento del meccanismo di chiusura degli otturatori, chiudere manualmente gli otturatori agendo sulle apposite leve poste sugli involucri delle sorgenti sigillate, indossando i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.).
- Segnalare al responsabile dell'apparecchiatura ed all'Esperto Qualificato ogni situazione di anormale funzionamento dell'apparecchiatura.
- Segnalare il proprio stato di gravidanza presunto od accertato, per il personale di sesso femminile.

E' vietato

- Rimuovere o manipolare le sorgenti sigillate.
- Alterare i dispositivi di protezione e di sicurezza.
- Aprire e/o chiudere manualmente gli otturatori.
- La loro chiusura manuale è consentita solo in caso di malfunzionamento del dispositivo automatico di chiusura.