

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	--

Emissione: 14.1.2000	<b>PROCEDURA N. 61</b>
1° Aggiornamento: 14.1.2001 2° Aggiornamento: 27.9.2001	<b>NORME DI RADIOPROTEZIONE NELL'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE DI DENSITOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA</b>
Destinatari	Personale medico e T.S.R.M. della Medicina Nucleare.

◀ **NORME DI PROTEZIONE**

**E' obbligatorio**

- Uscire dal locale durante l'esecuzione dell'esame o della calibrazione per tutto il personale non indispensabile.
- Sostare il più lontano possibile dall'apparecchiatura durante l'esame e la calibrazione, in caso d'impossibilità, a scopo cautelativo, indossare il grembiule anti-X.
- Segnalare al responsabile dell'apparecchiatura ed all'Esperto Qualificato ogni situazione di anormale funzionamento dell'apparecchiatura.
- Segnalare il proprio stato di gravidanza presunto od accertato, per il personale di sesso femminile.

**E' vietato**

- Alterare i dispositivi di protezione e di sicurezza.